


# TISSUE MANAGEMENT Decision Tree



Vi har designet vores vævshåndteringsprodukter, så de fungerer sammen. Dette betyder, at du som tandlæge kan tilpasse behandlingen med forskellige hæmostasemidler og instrumenter, afhængigt af det individuelle tilfælde. Uanset om du tager aftryk, fremstiller en klasse V-fylgning, eller cementerer en krone, er der et produkt, der er godt, bedre og bedst.

Den endelige beslutning er naturligvis din som tandlæge, men her er vores anbefalinger til anvendelse af vores sortiment af vævshåndteringsprodukter.

# TISSUE MANAGEMENT Decision Tree

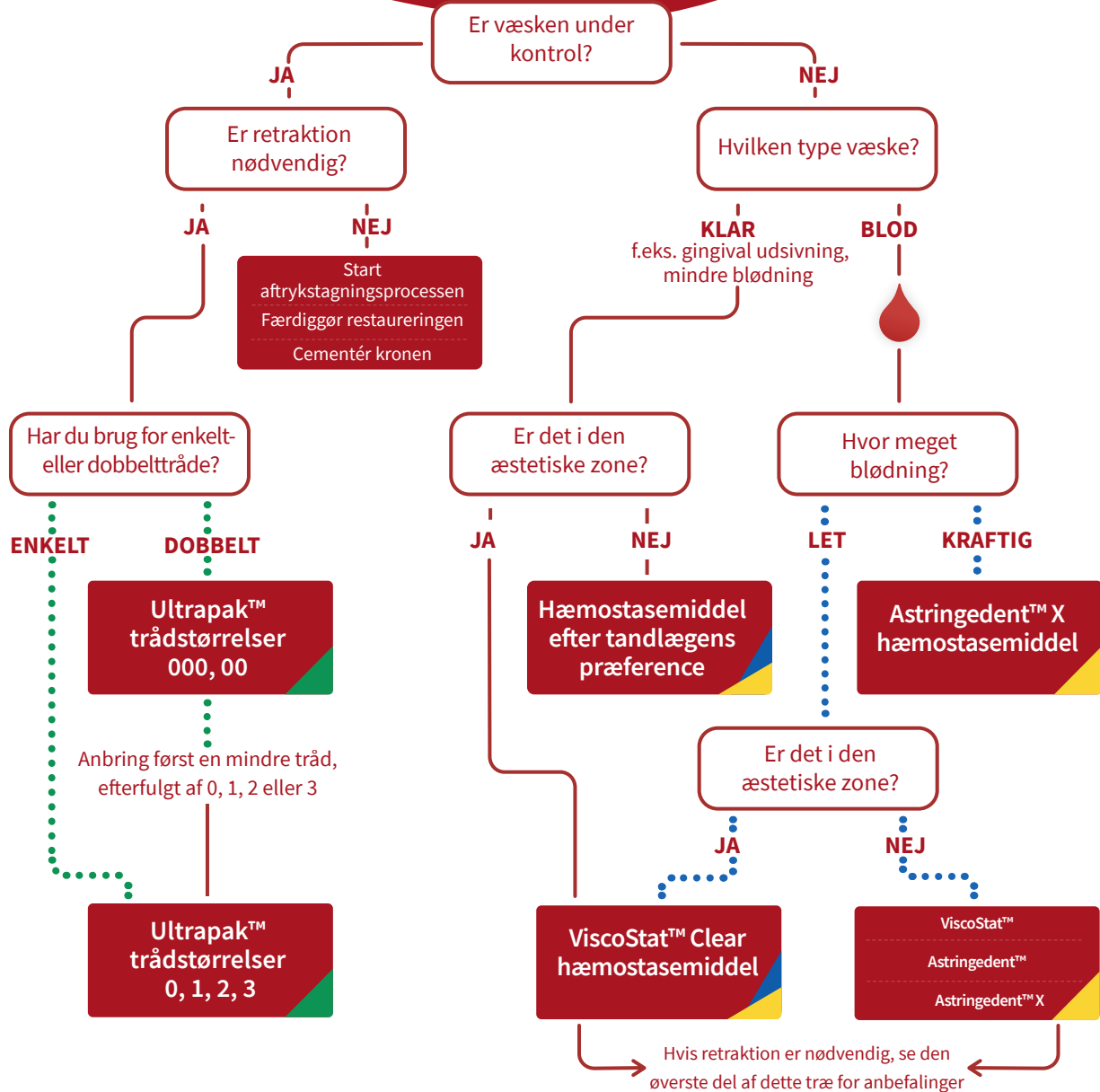

## NØGLE

### ●●● Indikator for appliceringsteknik

Sørg for at gnide kraftigt ind i pochene. Et kraftigt tryk giver det bedste resultat med det valgte hæmostasemiddel.

### ●●● Indikator for teknik til iblødlægning af tråde

Læg den første tråd i blød i hæmostasemiddel.

### ▲ Fischer's Ultrapak™ Packers

Specialdesignede til at forenkle pakningen af de strikkede Ultrapak-tråde. Den tynde kant trykker sig ind i tråden og den savtakkede kant reducerer risikoen for traumer på det gingivale attachment.

### ▲ Blue Mini™ Dento-Infusor™ Tip

- Anvendes i tilfælde af sårbart gingivalt væv eller sensitivitet.
- Hvis der kun kræves kontrol af sulcusvæsken, kan den blødere tip på den blå Dento-Infusor af plastik være mere skånsom.

### ▲ Metal Dento-Infusor™ Tip

- Effektiv til applicering af hæmostasemidler. Den er bedst ved blødning, særligt kraftig blødning, og fjerner overfladisk koagel.
- Har en stump, bøjet kanyle med en polstret „skrubbeborste“, der muliggør infusion og rengøring i den præparerede poche.